



U G C N
uiergezondheidscentrum nederland

Postbus 2030
7420 AA Deventer
Nederland

www.ugcn.nl


Melkmonsters

Alleen door middel van bacteriologisch onderzoek is vast te stellen welke bacteriën de veroorzakers zijn van mastitis op uw bedrijf.

Neem altijd een melkmonster vóór de antibioticatoediening.

Nodig: melkmonsterbuisjes, tepeldoekjes (of spiritus 80% en watten). Werk hygiënisch om vervuilde melkmonsters te voorkomen. Bemonster tijdens een normale melkbeurt voordat u het melkstel aansluit.



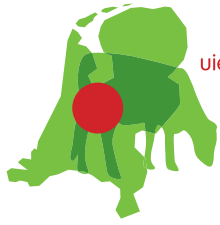

U G C N

uiergezondheidscentrum nederland



Zo neemt u melkmonsters:

Neem altijd een melkmonster vóór u antibiotica toedient. Als u het niet direct in laat zetten, bewaar het dan in de diepvries. Dat kost geen geld en nauwelijks moeite. Weggooien kan altijd nog en soms kunt u er later veel informatie uit halen.

- 1 • Maak de uier en speen goed schoon met een uierdoek.
- 2 • Melk de eerste stralen weg.

- 3 • Hanteer bij het ontsmetten en het nemen van een melkmonster altijd een vaste volgorde.
 - Begin bij het ontsmetten van de spenen bij de spenen die het verst van u afstaan.
 - Voor het nemen van een melkmonster begint u bij de spenen die het dichtst bij u staan.

- 4 • Noteer datum koenummer en kwartier op het buisje met een watervaste stift.

- 5 • Neem het melkbuisje tussen duim en wijsvinger van de niet melkende hand. Trek met de andere hand de dop van het buisje en klem deze tussen de middelvinger en wijsvinger van de niet melkende hand. Houd de dop met de onderzijde naar beneden.
- 6 • Melk twee stralen weg.
 - Houd het buisje schuin en melk het voor 3/4 vol.
 - Plaats de dop op het melkbuisje.